


# LinX CGM - Registro App

## ¿Qué necesito para registrarme en la aplicación?

- ✓ Correo electrónico
- ✓ Contraseña: debe tener **8 caracteres** como mínimo y contener al menos **1 letra mayúscula, 1 minúscula y 1 número** (no usar caracteres especiales).

## Paso a paso del registro:

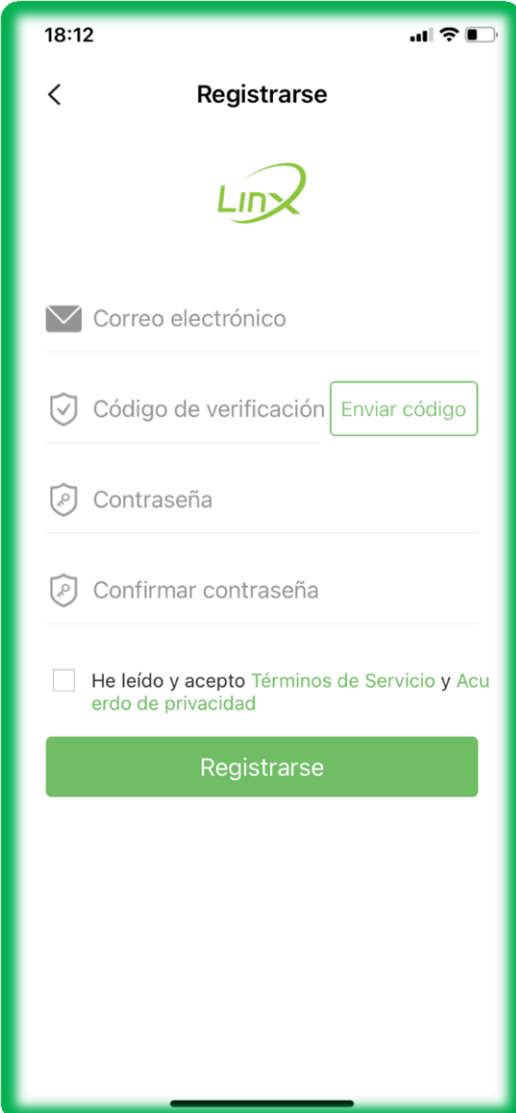

18:12

< Registrarse

LinX

✉ Correo electrónico

✓ Código de verificación

🔒 Contraseña

🔒 Confirmar contraseña

He leído y acepto [Términos de Servicio y Acuerdo de privacidad](#)

Registrarse

1.- Completa el campo **“Correo electrónico”** con tu correo electrónico.

2.- Pulsa **“Enviar Código”**.

3.- Recibirás un **“Código de Verificación”** en el correo ingresado.

4.- Introduce el **Código de Verificación**.

5.- **Crea una contraseña**.

6.- **Confirma la contraseña**.

7.- **Marca la casilla de “He leído y acepto Términos de Servicio y Acuerdo de privacidad”**

7.- **Presiona “Registrarse”**

Ya estás listo para configurar tu sensor en la aplicación.